




mega Mandrells

	31-100	5mm (Kopf) 12 Stück / Kopf klein		
	31-112	5mm (Kopf) 100 Stück / Kopf klein		
Maximale Ausspannlänge des Werkzeugs	Scheiben mit max. Ø10 x 2 (< 1 g)	Scheiben mit max. Ø22 x 1 (< 1 g)	Scheiben mit max. Ø22 x 3 (< 3 g)	
25 mm	20.000 rpm	20.000 rpm	10.000 rpm	

	31-200	8mm (Kopf) 12 Stück / Kopf groß		
	31-212	8mm (Kopf) 100 Stück / Kopf groß		
Maximale Ausspannlänge des Werkzeugs	Scheiben mit max. Ø10 x 2 (< 1 g)	Scheiben mit max. Ø22 x 1 (< 1 g)	Scheiben mit max. Ø22 x 3 (< 3 g)	Scheiben mit max. Ø38 x 1 (< 3 g)
25 mm	15.000 rpm	15.000 rpm	10.000 rpm	5.000 rpm

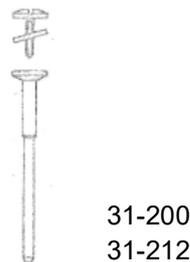

Art.Nr.	Kopf-Ø	Schaft-Ø	Gewinde	Länge	Lieferbar in		
	Head-Ø	Shank-Ø	Screw	Length	NI	CR	RS
31-100 31-112	5 mm	2,35 mm	M 1,7	45 mm	●	●	●
31-200 31-212	8 mm	2,35 mm	M 1,7	48 mm	●	●	●

N = vernickelt / nickel-plated

CR = verchromt / chrome-plated

RS = rostfrei / stainless steel

Anwendungsbereiche:

- Träger zum Aufspannen von Papierscheiben, Nylonscheiben, diamantbeschichteten Scheiben, Trennscheiben und Kreissägen.

Reinigung / Sterilisation:

- Alle ***megadental*** Träger werden unsteril geliefert und sind für den mehrmaligen Gebrauch vorgesehen.
- Einzelteile bei Reinigung und Sterilisation sichern.

Sicherheits- und Lagerhinweise:

- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Beschädigte Träger nicht weiterverwenden. Sichtprüfung vor jedem Einsatz.
- Träger mit Schraube sind nur für Rechtslauf vorgesehen.
- Träger mit Schraube nur mit Unterlegscheibe verwenden. Übermäßiges Anziehen der Schraube vermeiden (Bruchgefahr)
- Arbeiten Sie mit mäßiger Anpresskraft (max. 3N)
- Aufgespannte Werkzeuge dürfen keine Unwucht besitzen, der Träger könnte brechen. Nicht rundlaufende Werkzeuge müssen vor dem Einsatz mit niedriger Drehzahl abgerichtet werden.
- Plötzliche Drehzahländerung vermeiden.
- Überschreiten Sie niemals die über den jeweils montierten Artikel empfohlene Drehzahl.
- Invasiv eingesetzte Träger müssen aus rostfreiem Stahl sein.
- RA und FG Träger müssen immer über die gesamte Schaftlänge eingespannt sein.
- Größere bzw. schwerere Werkzeuge als unten angegeben dürfen nicht montiert werden.
- Die Träger dürfen nicht in feuchter Umgebung gelagert werden (Korrosion).
- Gilt auch für rostfreie Träger.
- Anwendung nur durch entsprechend ausgebildete Personen.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

megadental GmbH • Seeweg 20 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49(0)6042-97550 • FAX +49(0)6042-975520
E-Mail: info@megadental.de • Internet: www.megadental.de